

### Was ist Nasaline?

Mit **Nasaline** kann die Nase auf einfache, bequeme und sichere Weise mit einer Salzwasserlösung gespült werden. Dieses Spülen mit Salzwasser ist eine bewährte Methode, die weltweit von Ärzten empfohlen wird.



### Warum soll man Nasaline benutzen?

- Das Spülen entfernt Pollen, überflüssigen Schleim, Schorfbildungen, Staub- und Rußpartikel und kann als Ergänzung zu einer medikamentösen Behandlung benutzt werden.
- Es vermindert Beschwerden u.a bei Erkältungen, allergischen Schleimhautreaktionen im Nasenbereich, Nasenverstopfung nach Aufenthalt in trockener, staubiger oder rauchiger Umgebung. Das Reizen in der Nase wird vermindert, und die Schleimhäute werden neu befeuchtet.
- Nasaline kann zur Spülung der Nase wiederholt benutzt werden.
- Auf Empfehlung des Arztes kann Nasaline nach Operationen der Nase oder Nasennebenhöhlen angewendet werden.

### Bestellinformationen

#### Artikel Nr.

76-601	Nasaline Nasenspüler Set Erwachsene inkl.Nasenolive und 10 Beutel Spülsalz	
76-602	Nasaline Nasenspüler Set Kinder inkl.Nasenolive und 10 Beutel Spülsalz	
76-603	Nasaline Nasenspül Salz P/50	
76-606	Nasaline Nasenspüler Set Erwachsene inkl.Nasenolive und10 Beutel Spülsalz	P/6
76-612	Nasaline Nasenspüler Set Erwachsene inkl.Nasenolive und10 Beutel Spülsalz	P/12

## Nasaline - Das Nasenspülsystem



Hilft gegen Verstopfung der Nase bei Allergien, Erkältungen, Grippe so wie bei Infektionen der Nasennebenhöhlen.

Empfohlen nach Operationen der Nase oder der Nasennebenhöhlen und zur Vorbeugung von Infektionen der Atemwege.

# Nasaline - Das Nasenspülsystem



1

Lösen Sie einen halben Teelöffel (2,5g) Salz in einem 1/4 Liter körperwarmen Wasser auf



2

Füllen Sie die Spritze mit dem Salzwasser


Ohne Medikamente!



Schneuzen Sie das überflüssige Salzwasser aus

3

Spülen Sie die Nase langsam mit dem körperwarmen Salzwasser

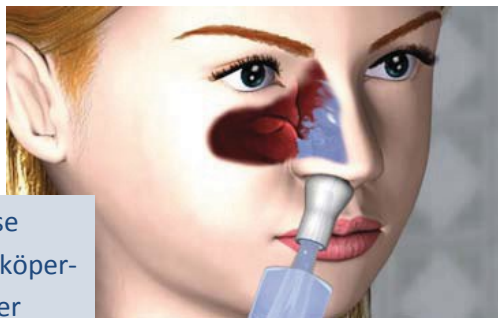

Allergien • Erkältungen • Grippe • Infektionen der Nasennebenhöhlen