

Qu'est Nasaline?

Avec **Nasaline** le nez peut être irrigué de manière simple, agréable et sûre avec une solution saline. Cette irrigation avec eau salée est une méthode éprouvée que recommandent les médecins du monde entier.



Pourquoi utiliser Nasaline?

- L'irrigation élimine les pollens, le mucus superflu, les croûtes, les particules de poussière et de fumée et peut être utilisé en complément à un traitement médicamenteux.
- Elle atténue entre autres les problèmes de refroidissements, réactions allergiques des muqueuses nasales, nez bouchés après séjour dans un environnement sec, poussiéreux ou enfumé. L'irritation nasale est atténuée et les muqueuses se retrouvent humidifiées.
- Nasaline peut être utilisé à plusieurs reprises pour irrigation nasale.
- Sur prescription médicale Nasaline peut être utilisé après opérations dans le nez ou les sinus.

Commandes

Article no

- 76-601 Nasaline irrigation nasale set pour adultes avec olive nasale et 10 sachets de sel pour irrigation
- 76-602 Nasaline irrigation nasale set pour enfants avec olive nasale et 10 sachets de sel pour irrigation
- 76-603 Nasaline sel pour irrigation nasale P/50
- 76-606 Nasaline irrigation nasale set pour adultes avec olive nasale et 10 sachets de sel pour irrigation P/6
- 76-612 Nasaline irrigation nasale set pour adultes avec olive nasale et 10 sachets de sel pour irrigation P/12

Nasaline

Le système d'irrigation nasale



Soulage l'obstruction du nez en cas d'allergie, de refroidissement, de grippe et d'infections des sinus.

Recommandé après opérations du nez ou des sinus et pour prévenir les infections des voies respiratoires.

Nasaline – Le système d'irrigation nasale



1

Dissoudre ½ cuillerée à café (2,5 g) de sel dans 1/4de litre d'eau à la température du corps



2

Remplir la seringue d'eau salée


Sans médicaments!



Moucher l'eau salée en excès

3

Rincer lentement le nez avec l'eau salée à la température du corps

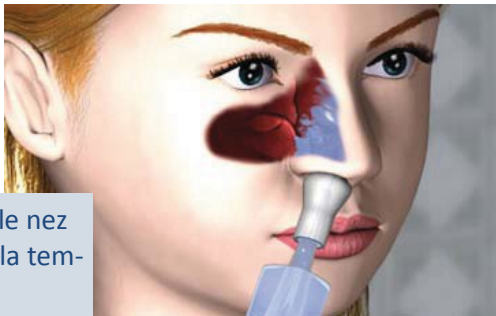

Allergies • Refroidissement • Grippe • Infections des sinus