


## Nozovent

**Schlafen ohne Schnarchen**  
leichter atmen – erholt und frisch aufwachen

## Nozovent

**Dormir sans ronfler**  
respirer mieux – réveil frais et dispos

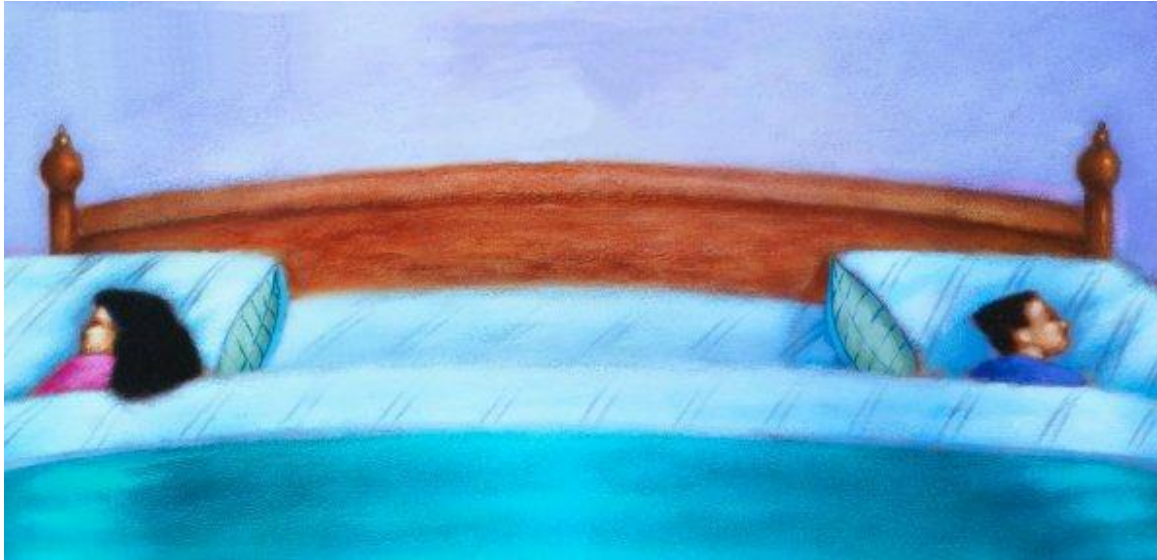


Schnarchen stört nicht nur den Schlaf des Partners, es beeinträchtigt auch die Schlafqualität, das Wohlfühl und die Gesundheit.

Ronfler ne fait pas que gêner les voisins qui dorment, mais affecte la qualité du sommeil, le bien-être et la santé.

Nozovent dehnt den schmalsten Teil des weichen Nasenkanals und erleichtert die Nasenatmung.

Nozovent dilate les parties les plus étroites du conduit nasal souple et permet de mieux respirer par le nez.

- Klemmen Sie die Flügel zwischen Zeigefinger und Daumen zusammen.
- Führen Sie einen Flügel in jedes Nasenloch ein.

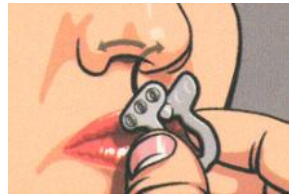

- Pincer les parties plates (ailes) entre l'index et le pouce.
- Insérer une aile dans chaque narine.

- Ziehen Sie vorsichtig am Zwischen- (Verbindungs-) stück, welches ausserhalb der Nase liegt, um den sicheren Halt von Nozovent zu überprüfen.



- Afin de vérifier la stabilité de Nozovent, tirer légèrement sur la partie intermédiaire restée à l'extérieur pour s'assurer du bon maintien du Nozovent.

Art. Nr.		Grösse
53-200	6 P/2	M
53-201	1 P/2	M
53-202	6 P/2	L
53-203	1 P/2	L
53-204	6 P/2	S
53-205	1 P/2	S
53-212	12 P/2	M

Art. no		Tailles
53-200	6 P/2	M
53-201	1 P/2	M
53-202	6 P/2	L
53-203	1 P/2	L
53-204	6 P/2	S
53-205	1 P/2	S
53-212	12 P/2	M